

“De nieuwe ARDO Carum betekent een grote vooruitgang op het gebied van klinische kolven. Zij biedt innovatieve functies, is gebruiksvriendelijk en absoluut individueel instelbaar.”

Katrin Reich, adviseuse borstvoeding en lactatie IBCLC, verpleegkundige kinderen

Uit liefde voor borstvoeding



#### Inhoud en technische gegevens

	Carum	Carum accu
Identificatienummers	Art.Nr. 63.00.71	Art.Nr. 63.00.75
Inhoud/ Uitvoering	Carum borstkolf, netsnoer, transport - en opbergcontainer	Carum borstkolf met ingebouwde accu, netsnoer, transport - en opbergcontainer
Gewicht/ Massa	3.0kg / 302x240x180mm	3.6kg / 302x240x180mm
Technische gegevens	Stimulatiemodus: vacuüm 60 – 130 mbar, cycli 72 – 120/ min; startgegevens: 60 mbar/ 90 cycli/ min Afkolfmodus: vacuüm 30 – 330 mbar, cycli 30 – 60/ min; startgegevens: stimulatievacuüm + 30 mbar Sensitieve Programma: Startgegevens 30 mbar/ 30 cycli/ min EURO-Plug 100-230 VAC, 50-60 HZ	
Conformiteit/ Normen	CE 0123 in overeenstemming met de richtlijn voor medische producten EMV getest	
Garantie	3 jaar	



#### Rolrek

Stabiel, wendbaar en functioneel.  
Fleshouder aan beide kanten.  
Geïntegreerde houder voor het extra lange netsnoer (3 m).

Bezoek de Carum website met veel informatie, video's en meer spannende details omtrent de nieuwe standaard voor klinische borstkolven!


[www.carum-borstkolf.nl](http://www.carum-borstkolf.nl)

Bent u op zoek naar meer informatie?  
Dan horen wij graag van u!



Ardo medical Benelux BV  
Liesbosch 12 Z  
3439 LC Nieuwegein  
Nederland  
T + 31 (0)30 - 280 42 42  
F + 31 (0)30 - 288 3235  
info@ardomedical.nl  
www.ardomedical.nl

Ardo medical AG  
Gewerbestrasse 19  
6314 Unterägeri  
Switzerland  
T +41 (0)41 754 70 70  
F +41 (0)41 754 70 71  
info@ardo.ch  
www.ardomedical.com

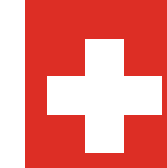

## ARDO Carum

de nieuwe standaard voor klinische borstkolven

met  
individuele  
stimulatie-  
modus



Ardo medical AG reserves the right to change the color, design and technical specifications of these products.


07/2011

Uit liefde voor borstvoeding

## "IndividualPhases" – voor moeders die zelf willen bepalen!

Uit recent onderzoek\* blijkt dat moeders het op prijs stellen als ze het aantal cycli en het vacuüm individueel kunnen instellen.

De Carum is de eerste borstkolf waar zowel in bijschakelbare stimulatiemodus als in de afkolfmodus de cyclus en het vacuüm apart ingesteld kunnen worden.

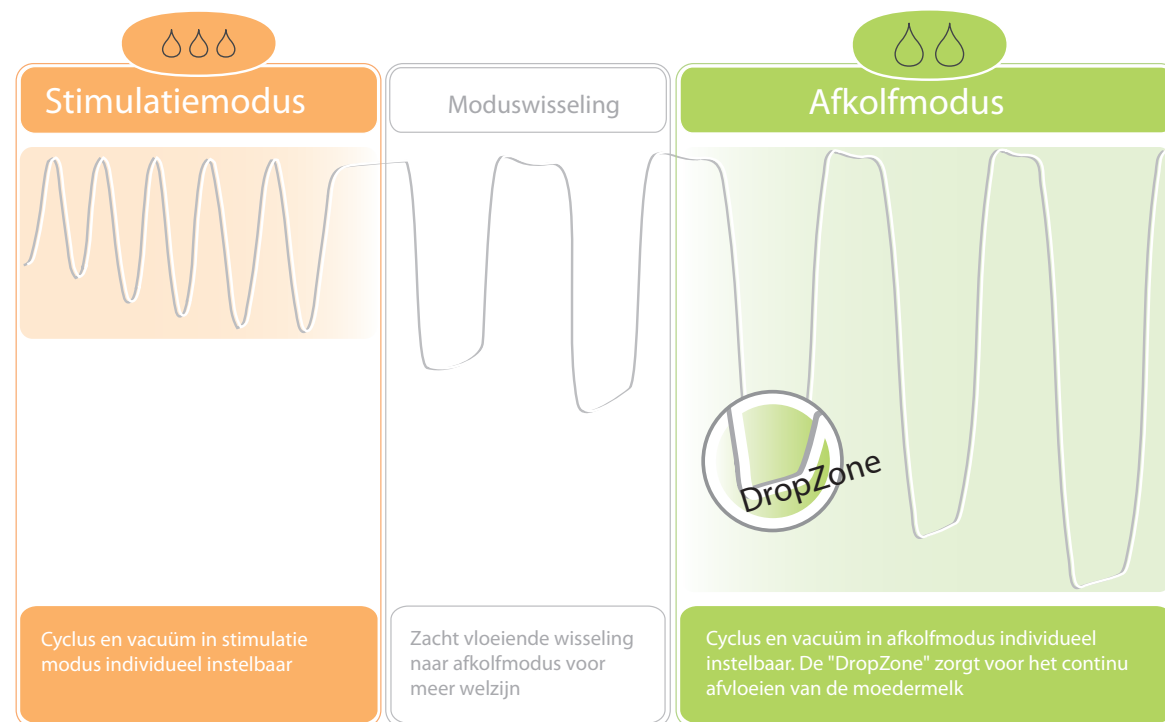

\*Uit onderzoek met Carum blijkt: Meer dan 90% van de moeders kiezen individueel voor een zuigritme van minder dan 110 cycli per minuut.

### Sensitive Program



Diepe begincycli en vacuüm voor bijzonder behoedzame werking.

Simpelweg uniek: het bijschakelbare "Sensitive Program." Behoedzame, diepe begincyclus en vacuüm speciaal voor zere en gevoelige tepels.

### Carum – individueel en zacht

Vacuüm en cyclus kunnen zowel in de stimulatiemodus als in de afkolfmodus onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Een zachte moduswisseling is altijd mogelijk – automatisch of manueel per toetsdruk. Dankzij het speciale "Sensitive Program" met lage begincyclus en vacuüm is de kolf ook geschikt voor moeders met zere en gevoelige tepels.

De Carum is samen met borstvoedings adviseuses volgens de meest recente ervaringen ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland

### Kleurendisplay- geniaal eenvoudig!

Met behulp van verschillende achtergrondkleuren kan men gemakkelijk de stimulatie- en afkolf-fase onderscheiden. Groot kleurendisplay met dimlichtfunctie voor de nacht en kolfijdvermelding. Instellingen voor vacuüm en cyclus optimaal herkenbaar door balkweergave.

### Sterk in dubbelkolven

Dubbelkolven zonder verlies aan zuigkracht en zonder de zuiglijn te beïnvloeden – met de nieuwe kolftechniek "DualCylinder."

### KolfSet met VacuuSeal

De vacuümpot, geïntegreerd in de KolfSet, vormt het hart van onze "VacuuSeal" technologie. Het garandeert dat moedermelk en ziektekiemen niet in de slang en in de kolf terecht kunnen komen. Meer veiligheid, en reinigen met minder moeite.



### Fles of zak ?

De Carum is voor beide uitgerust! Met een afneembare dubbele flessenhouder en een aparte diepvrieszakhouder.

