

- Vacuum and cycles can be adjusted, independently of each other, both in stimulation and expression mode

વેક્યુમ અને સાયકલમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. વેક્યુમ અને સાયકલનાં સ્ટિમ્યુલેશન અને એક્સપ્રેશન મોડમાં અલગ અલગ ફેરફાર થઈ શકે છે.

- Gentle mode change can be made any time with the touch of a button એક બટન દાબવાથી જ ગમે ત્યારે જેન્ટલ મોડ બદલી શકાય છે.
- The background colours of the LCD screen change to distinguish between stimulation mode, which is displayed in **orange** and expression mode in **green**

એલસીડી સ્ક્રિનના રંગ બદલાય છે જેથી ખબર પડે કે સ્ટિમ્યુલેશન મોડ છે જેનો **ઓરેંજ કે નારંગી** કલર છે અને એક્સપ્રેશન મોડ જે **લીલા** રંગમાં બદલાય છે

- Sensitive program has been designed especially for mothers with sore or sensitive nipples to directly pump without stimulation





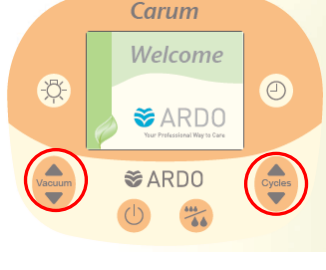


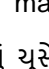

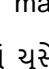

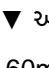

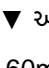


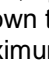

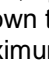


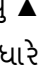

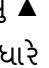

જે માતાઓનાં સત્નની ડીંટીમાં પીડા થતી હોય કે સેન્સિટીવ હોય એના માટે સેન્સિટીવ પ્રોગ્રામ છે જેથી સ્ટિમ્યુલેશન વગર પમ્પ થઈ શકે.

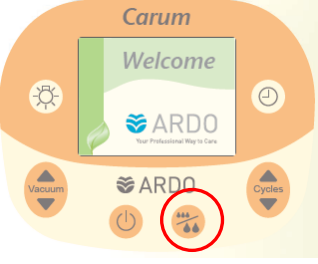






- Two independent cylinders ensure double pumping without loss of suction







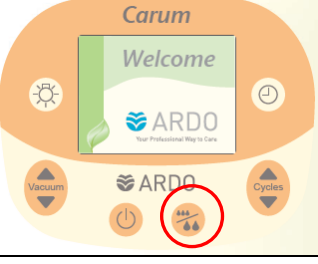



બે અલગ અલગ સીલીન્ડર છે જેથી ખાતરી આપે છે કે ચૂસવાની પ્રક્રિયામાં કંઈ ખોટ ન આવે.




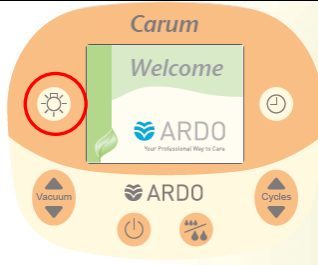


Technical Data ટેકનિકલ ડેટા			
Stimulation Mode સ્ટિમ્યુલેશન મોડ	Vacuum વેક્યુમ 30-150 m બાર	Cycles સાયકલ્સ 72-120 દર મિનિટ	Start Levels સ્ટાર્ટ લેવલ્સ 60mbar/90 cycles per minute 60mબાર/90 સાયકલ્સ દર મિનિટ
Expression Mode એક્સ્પ્રેશન મોડ	Vacuum વેક્યુમ 30 -330mbar 30 -330m બાર	Cycles સાયકલ્સ 30-60 per minute 30-60 દર મિનિટ	Start Levels સ્ટાર્ટ લેવલ Stimulation vacuum સ્ટિમ્યુલેશન વેક્યુમ+30mબાર/45 સાયકલ્સ
Sensitive Programme સેન્સિટીવ પ્રોગ્રામ			Start Levels સ્ટાર્ટ લેવલ્સ 30mbar /30 cycles per minute 30mબાર/30 સાયકલ દર મિનિટે
Input Voltage ઈનપુટ વોલ્ટેજ	100-230 VAC, 50-60 Hz		
Weight વજન	3 kg (3.6kg) with battery 3 કિલોગ્રામ (3.6 કિલોગ્રામ) બેટરી સાથે		

Expressing with stimulation mode સ્ટિમ્યુલેશન મોડ વાપરવા માટે

	<p>Switch the unit on by pressing the  on/off button. The breastpump displays a welcome message for 2 seconds.</p> <p>મશીનને ચાલુ કરવા માટે આ  સ્વિચ દબાવો જે ઓન/ઓફ બટન છે. બ્રેસ્ટપંપ 2 સેકન્ડ માટે વેલકમ મેસેજ બતાવે છે.</p>
	<p>The LCD display has an orange background indicating stimulation mode and the small droplet icon is displayed.</p> <p>સ્ક્રિનમાં નારંગી બેકગ્રાઉન્ડ છે જે બતાવે છે કે એ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર છે અને નાના ટીપાંની નીશાની પણ બતાવેલ છે.</p> <p>The pump automatically starts in stimulation mode at 60 mbar and 90 cycles per minute, the timer starts.</p> <p>આ પંપ આપોઆપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર શરૂ થાય છે જે 60 mબાર અને 90 સાયકલ દર મિનિટે હોય છે અને ટાઈમર શરૂ થાય છે.</p>
	<p>The vacuum  can be adjusted, one level at a time, by repeatedly pressing   or by holding down the   button - minimum of 30mbar/ maximum 150mbar</p> <p>વેક્યુમ કે કેટલું ચૂસે છે એમાં આ બટનથી  ફેરફાર થઈ, એક એક લેવલ વધારી, ઘટાડી શકાય આ દબાવાથી   અથવા એને દાબી રાખવાથી   ઓછામાં ઓછું 60mબાર/ વધારામાં વધારે 130mબાર</p> <p>The cycle  frequency can be adjusted, one level at a time, by repeatedly pressing   or by holding down the   button - minimum 72/ maximum 120 cycles per minute</p> <p>સાયકલ  ફ્રિક્વન્સી પણ બદલી શકાય છે, એમ કરવા માટે આ બટન દબાવવાના   અથવા એને દાબી રાખવું   - ઓછામાં ઓછું 72/ વધારામાં વધારે 120 સાયકલ્સ દર મિનિટે</p>

	<p>The pump automatically switches to expression mode after two minutes.</p> <p>બે મિનિટ પછી આ પંપ ઓટોમેટિકલી એક્સ્પ્રેશન મોડ પર ઓન થાય છે.</p> <p>NB press the droplet  button once to return to the stimulation mode.</p> <p>નોંધ ટીપાં દર્શાવતું બટન એક વખત દાબો  તો ફરી સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર આવી જશે.</p>
	<p>The LCD displays the green background for expression mode and the larger droplet icon is displayed.</p> <p>સ્ક્રિન પર લીલા રંગનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો એક્સ્પ્રેશન મોડ અને મોટું ટીપું બતાવેલ છે.</p> <p>The breastpump is set at stimulation vacuum + 30mbar and reduced to 45 cycles per minute. The levels are indicated on the bar charts to the right and left of the screen.</p> <p>બ્રેસ્ટપંપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર સેટ કરવામાં આવ્યો છે. વેક્યુમ + 30mબાર અને એ સાયકલ ઓછું કરવામાં આવ્યું છે 45 દર મિનિટે થાય છે. લેવલ કેટલું છે એ બાર ચાર્ટ સ્ક્રિનની જમણી બાજુ દર્શાવેલ છે.</p>
	<p>The vacuum and cycle can adjusted, one level at a time, by repeatedly pressing ▲ ▼ or by holding down the ▲ ▼ button.</p> <p>વેક્યુમ અને સાયકલમાં ફેરફાર થઈ શકે. એક પછી એક લેવલ બદલાવી શકાય ▲ ▼ આ બટન દબાવવાથી અથવા રાખવાથી ▲ ▼ દાબી રાખવાથી.</p> <p>Vacuum minimum 30mbar/maximum 330mbar. Cycles minimum 30/maximum 60 cycles per minute.</p> <p>વેક્યુમ ઓછામાં ઓછું 30mબાર/ વધારામાં વધારે 330mબાર.સાયકલ ઓછામાં ઓછું 30/વધારામાં વધારે 60 સાયકલ્સ દર મિનિટે.</p> <p>Press the  button when finished વાપરી લીધા પછી આ  બટન દબાવો</p>

Sensitive Setting સેન્સિટીવ સેટીંગ	
	<p>Switch on the unit by pressing the  on/off button. The breastpump displays a welcome message for 2 seconds.</p> <p>યૂનિટને ચાલુ કરવાં માટે આ  ઓન/ઓફ બટન દબાવો. બ્રેસ્ટપંપ 2 સેકન્ડ માટે વેલકમ મેસેજ બતાવે છે.</p> <p>Immediately press the droplet  button and the machine changes to sensitive mode તરત જ ટીપાં દર્શાવતું  દબો અને મશીન સેન્સિટીવ મોડ પર આવી જશે.</p>
	<p>The LCD displays the green background for expression mode and the larger droplet icon is displayed.</p> <p>સ્ક્રિન પર લીલા રંગનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો એક્સપ્રેશન મોડ અને મોટું ટીપું બતાવેલ છે.</p> <p>The vacuum is set at 30mbar and cycle is set at 30 cycles per minute, which provides a very gentle setting to start, this is fully adjustable. The levels are indicated on the bar charts to the right and left of the screen.</p> <p>વેક્યુમ 30mબાર પર સેટ કરેલ છે અને સાયકલ દર મિનિટમાં 30 સાયકલ પર સેટ કરેલ છે. જે ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે અને એમાં પૂરી રીતે ફેરફાર થઈ શકે. બાર ચાર્ટની જમણી અને ડાબી બાજુ લેવલ બતાવેલ છે.</p>
Repeat stimulation mode સ્ટિમ્યુલેશન મોડ ફરી કરવું	
	<p>Press the droplet  button</p> <p>ટીપાં દર્શાવતું  બટન દાબો</p>
	<p>The LCD display has an orange background indicating stimulation mode and the small droplet icon is displayed.</p> <p>સ્ક્રિનમાં નારંગી બેકગ્રાઉન્ડ છે જે બતાવે છે કે એ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર છે અને નાના ટીપાંની નીશાની પણ બતાવેલ છે</p> <p>The pump starts in stimulation mode at 60 mbar</p>

	<p>and 90 cycles per minute, the timer starts, then automatically switches to expression mode after two minutes</p> <p>આ પંપ આપોઆપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર શરૂ થાય છે જે 60 મબાર અને 90 સાયકલ દર મિનિટે હોય છે અને ટાઈમર શરૂ થાય છે. આપોઆપ બે મિનિટ પછી એક્સપ્રેશન મોડ શરૂ થાય છે</p>
<p>Timer operation ટાઈમર વાપરવું</p>	
	<p>To stop the timer press the  button when the breastpump is running. The timer will remain de-activated until it is restarted by pressing the button again. The timer can be switched on and off in either stimulation or expression mode.</p> <p>ટાઈમર બંધ કરવા માટે બ્રેસ્ટપંપ ચાલું હોય ત્યારે આ  બટન દબાવો. એ ટાઈમર બંધ થઈ જશે અને ફરી શરૂ કરવા માટે એ જ બટન દબાવો. સ્ટિમ્યુલેશન કે એક્સપ્રેશન મોડમાં ટાઈમર ખોલ બંધ કરી શકાય.</p>
<p>Backlight button સ્ક્રિનની લાઈટમાં ફેરફાર કરવો</p>	
	<p>Press the  button once to reduce the intensity of the backlight. The dim function can be turned on and off as required.</p> <p>સ્ક્રિનની લાઈટમાં ફેરફાર કરવા માટે આ  બટન એક વખત દબાવો જેથી સ્ક્રિન ઝાંખી થઈ જાય એ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે વાપરી શકાય છે.</p>